

Аппарат для низкочастотной магнитотерапии ЭМА ПОЛЮС-101

Магнитотерапия



Ваша цена

Розница

134 500 руб.

Оптовая цена

127 775 руб.



В наличии

Области применения:

- Здравоохранение

НДС не облагается

Описание

Аппарат для низкочастотной магнитотерапии ЭМА ПОЛЮС-101

ЭМА ПОЛЮС-101 — аппарат для проведения низкочастотной магнитотерапии, предназначенный для лечения заболеваний периферических сосудов, суставов, позвоночника, нервной системы, а также последствий травм конечностей. Воздействие осуществляется синусоидальным низкочастотным магнитным полем, оказывающим выраженное противоотечное, обезболивающее и трофостимулирующее действие.

Аппарат применяется в физиотерапевтических кабинетах и палатах лечебно-профилактических учреждений. Во время процедуры пациент помещает конечность внутрь кольцевого индуктора, после чего медицинский персонал задает необходимые параметры воздействия. Магнитотерапия способствует улучшению локального кровообращения, усилению доставки кислорода и питательных веществ к тканям, ускорению выведения продуктов обмена и стимуляции процессов регенерации.

ЭМА ПОЛЮС-101 состоит из блока управления и двух кольцевых индукторов-соленоидов диаметром 260 мм. Аппарат оснащён цифровой индикацией времени процедуры, световыми индикаторами, регулировкой интенсивности воздействия, выбором режима работы и возможностью независимого включения каждого индуктора.

Особенности

- Двухканальный аппарат для низкочастотной магнитотерапии.
- Два кольцевых индуктора-соленоидов диаметром 260 мм.
- Воздействие синусоидальным магнитным полем низкой частоты.
- Непрерывный и прерывистый режимы работы.
- Четыре ступени регулировки интенсивности магнитной индукции.
- Цифровая индикация времени процедуры.
- Световая индикация включения аппарата.
- Независимое включение каждого индуктора.
- Регулировка времени процедуры и интенсивности воздействия.
- Воздействие без нагрева тканей.
- Возможность проведения процедур через гипсовую повязку.
- Компактный пластиковый блок управления.
- Простое и понятное управление.
- Локальное воздействие на патологический очаг.
- Подходит для использования в условиях физиотерапевтических кабинетов и стационаров.

Показания к применению

- Заболевания периферических сосудов конечностей.
- Деформирующий спондилоостеохондроз.
- Деформирующий остеоартроз.
- Плечелопаточный периартроз.
- Эпикондилит.
- Диабетический полиневрит.
- Хроническая венозная недостаточность.
- Флебит.
- Тромбоз.
- Посттромботическая болезнь.
- Трофические язвы.
- Оклюзионные заболевания периферических артерий атеросклеротического генеза.

- Повреждения конечностей и их последствия.
- Термические ожоги кистей и стоп.

Противопоказания

- Наличие кардиостимулятора.
- Наличие металлических или электронных имплантов.
- Онкологические заболевания.
- Острые инфекционные заболевания.
- Склонность к кровотечениям.
- Тяжёлые психические расстройства.
- Эпилепсия.

Технические характеристики

Характеристика	Значение
Тип	Двухканальный
Вид магнитного поля	Синусоидальное
Количество индукторов	2 кольцевых соленоида
Диаметр индуктора	260 мм
Амплитудное значение магнитной индукции	0,5 – 5 мТл
Количество ступеней интенсивности	4
Режимы работы индукторов	Непрерывный, прерывистый
Частота пульсирующего тока питания	700 и 1 000 Гц
Размеры соленоида (Д × Ш × В)	260 × 277 × 164 мм >
Класс защиты	II, BF
Срок службы	5 лет

Комплект поставки

- Блок управления — 1 шт.
- Индуктор № 1 — 1 шт.
- Индуктор № 2 — 1 шт.
- Кабель индуктора — 2 шт.
- Кабель питания — 1 шт.
- Эксплуатационная документация.

Преимущества

- Двухканальная конструкция с двумя кольцевыми индукторами обеспечивает эффективное воздействие на конечности.
- Низкочастотное синусоидальное магнитное поле способствует улучшению микроциркуляции и трофики тканей.
- Воздействие не сопровождается нагревом тканей.
- Два режима работы индукторов: непрерывный и прерывистый.
- Четыре ступени регулировки интенсивности магнитной индукции позволяют индивидуально подобрать параметры терапии.
- Кольцевые индукторы обеспечивают локальное воздействие непосредственно на область лечения.
- Возможность проведения процедур при наличии гипсовой повязки на конечности.
- Цифровая индикация времени процедуры облегчает контроль продолжительности лечения.
- Световая индикация отображает состояние работы аппарата.
- Удобная панель управления с отдельными кнопками запуска, остановки, выбора режима, регулировки интенсивности и включения каждого индуктора.
- Независимое управление двумя индукторами повышает удобство проведения процедур.
- Компактные размеры и небольшая масса обеспечивают удобство транспортировки и размещения.
- Прочный пластиковый корпус блока управления устойчив к ежедневной эксплуатации.
- Способствует уменьшению отёка, снижению болевого синдрома и ускорению регенерации тканей.
- Усиливает эффективность комплексного медикаментозного лечения.
- Предназначен для эксплуатации в физиотерапевтических кабинетах и стационарах лечебно-профилактических учреждений.

Характеристики

Параметр:

Показатель:

Бренд	Завод ЭМА
Страна бренда	Россия
Отрасли	Реабилитация
Габариты, мм	312×371×126
Вес, кг	5
Электропитание, В	220
Потребляемая мощность, Вт	50
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.