

## Аппарат для прессотерапии и лимфодренажа Won Industry LC-600

Прессотерапия



### Ваша цена

Розница  
**0 руб.**

Оптовая цена  
 По запросу



Под заказ

### Области применения:

- Здравоохранение

НДС не облагается

- Количество секций в манжете: 6
- Давление в манжете, мм рт. ст.: 50...280
- Время работы, мин: 1...60
- Количество режимов работы: 5
- Особенности: есть ЖК-дисплей

Товар участвует в акциях:

- Акция

## Описание

### Аппарат для прессотерапии и лимфодренажа Won Industry LC-600

Won Industry LC-600 предназначен для проведения пневмокомпрессионной терапии. Он подходит для проведения глубокого лимфодренажа (локальной баротерапии) и пневмокомпрессионного массажа с направленным лимфодренажным компонентом.

Позволяет выполнять три вида воздействия на основе эффекта пневмокомпрессии:

- Прессотерапию (собственно, массаж на основе поочерёдного повышения давления в различных секциях манжет).
- Локальную баротерапию (глубокий лимфодренаж).
- Сочетанную прессотерапию (пневмокомпрессионный массаж) с направленным лимфодренажным компонентом.

Аппарат Won Industry LC-600 предлагает пять видов массажа, обеспечивая эффективное воздействие для различных терапевтических и косметологических целей:

- Программы А, С, D: классический компрессионный массаж – равномерное давление, направленное на улучшение микроциркуляции и снятие отёчности.
- Программа В: пневмокомпрессионный массаж с направленным лимфодренажным компонентом – способствует выведению лишней жидкости и стимуляции лимфатической системы.
- Программа Е: комбинированная программа – сочетает глубокий компрессионный массаж, направленный лимфодренаж и сегментарную локальную баротерапию для точечного воздействия на проблемные зоны.

Разнообразие программ позволяет индивидуализировать подход к каждому пациенту, обеспечивая высокий терапевтический результат.

#### Параметры работы

Аппарат снабжён ЖК-дисплеем, на котором отображаются все параметры работы: тип подключённой манжеты, давление в ней, скорость и время работы, а также выбранная программа массажа.

- Продолжительность давления в каждом сегменте (скорость программы) настраивается на 4, 8, 12, 16 или 20 секунд.
- Общее время работы программы задаётся заранее от 0 до 60 минут (рекомендованная длительность процедуры – не менее 10 минут).
- Давление в манжетах регулируется поворотом ручки от 50 до 280 мм рт. ст. Стандартное значение

– 200 мм рт. ст., от которого врач может варьировать в сторону уменьшения или увеличения, ориентируясь на комфорт пациента.

#### Манжеты

В комплект Won Industry LC-600 входят три вида манжет:

- две для ног (размер манжеты L);
- одна для талии;
- одна для руки.

Манжеты рассчитаны на разное телосложение и подходят для большинства пациентов.

Аппарат снабжён ЖК-дисплеем, на котором видны все параметры работы: тип подключённой манжеты, давление в ней, скорость и время работы, выбранная программа массажа. Продолжительность давления в каждом сегменте (скорость программы) может составлять 4, 8, 12, 16 или 20 секунд.

Регистрационное удостоверение Росздравнадзора ФСЗ 2011/10773 от 14.10.2011.

#### Показания к профилактике:

- Для косметологической практики (антицеллюлитный эффект, уменьшение объёмов тела, улучшение состояния и упругости кожи, снятие пастозности и отёков после аппаратной косметологии).
- Профилактика заболеваний и нарушений сердечнососудистой, нервной и опорно-двигательной систем.
- Профилактика варикозного поражения вен конечностей, венозных тромбозов.
- Профилактика заболеваний, потенцированных малоподвижным образом жизни (в т.ч. профилактика простатита, импотенции, запоров и атонии кишечника).
- Восстановительный период после травм и операций.

#### Показания к терапии:

- Хроническая варикозная болезнь вен нижних конечностей.
- Ишемическая болезнь сердца.
- Гипертоническая болезнь.
- Посттромбофлебитическая болезнь.
- Цереброваскулярная болезнь.
- Последствия острой недостаточности мозгового кровообращения и других поражений ЦНС, связанных с атонией, либо гипертонусом мышц конечностей.
- Остеохондроз позвоночника с цервикобрахиалгией, люмбашиазом и реактивными миозитами конечностей.
- Деформирующий остеоартроз суставов конечностей.
- Лимфостаз посттравматический, постоперационный, постинфекционный.

## Преимущества

---

- Возможность выбора режимов и степени давления.
- 5 различных режимов использования.
- 6-секционные манжеты безразмерные и подойдут всем.

## Характеристики

---

Параметр:	Показатель:
Бренд	Won Industry
Страна бренда	Южная Корея
Отрасли	Здравоохранение, Реабилитация, Эстетическая

медицина

<b>Ссылка на документы</b>	<a href="https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00000027181.pdf">https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00000027181.pdf</a> , <a href="https://tech.nv-lab.ru/links/UM-00000027181.pdf">https://tech.nv-lab.ru/links/UM-00000027181.pdf</a>
<b>Количество секций в манжете</b>	6
<b>Давление в манжете, мм рт. ст.</b>	50...280
<b>Время работы, мин</b>	1...60
<b>Количество режимов работы</b>	5
<b>Особенности</b>	есть ЖК-дисплей
<b>Габариты, мм</b>	415 × 360 × 210
<b>Вес, кг</b>	12
<b>Электропитание, В</b>	220
<b>Страна производства</b>	Южная Корея

**Дисклеймер:**

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.